


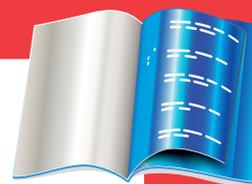

Внимание! Следуйте инструкции!



- Мобильные поручни созданы для того, чтобы поддерживать естественные движения, как, например, подъем. Поручни не предназначены для того, чтобы выдерживать полный вес тела, если он (вес) превышает максимально допустимую нагрузку.
- Перед каждым использованием мобильного поручня необходимо проверить индикатор безопасности и установить поручень в соответствии с инструкциями.
- Во избежание травм вследствие неправильного использования поручня и в целях оптимального использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции перед использованием поручня. Пожалуйста, сохраните инструкцию и убедитесь, что она доступна для всех, кто пользуется поручнем. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом оборудования.



**ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ
МОБИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ
К СТЕНЕ.**



**ПРИЖИМАЯ ПРИСОСКИ
К СТЕНЕ, ОДНОВРЕМЕННО
НАЖМИТЕ НА РЫЧАГИ.**



**ПОВЕРНИТЕ 1-Й РЫЧАГ,
А ЗАТЕМ 2-Й РЫЧАГ.**



**Пожалуйста,
внимательно
ознакомьтесь
с инструкцией
на обратной
стороне.**



**Всегда на страже
вашей безопасности.**

WWW.VEIGEL.RU

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

INFO@VEIGEL.RU +7 (495) 713-0007



Следуйте инструкции!

MOBELI®

Мобильные поручни - гениально просто и безопасно.

Принцип работы индикатора безопасности MOBELI - постоянный контроль уровня вакуума.

1



Максимальная безопасность.
Указанная номинальная нагрузка фактически гарантирует превышение веса в 1,5 раза (так, например, номинальная грузоподъемность в 70 кг соответствует 105 кг тестовой нагрузки).

2



Около 100% грузоподъемности.
Номинальная нагрузка (например, 70 кг) без запаса дополнительной нагрузки.
Внимание: закрепите устройство заново!

3



Внимание: Красный цвет — опасно! Объем вакуума поручня израсходован. Поручень может упасть. **Необходимо немедленно закрепить поручень.**

4



Если поручень закреплен на непористой поверхности в течение длительного времени, резина растягивается и выгибается. (Рис.4) Положите поручень с открытыми рычагами на ночь на ровную поверхность.

При повторном закреплении важно плотно прижать рычаги.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ.

В случае, если рычаги закрываются быстрее обычного при закреплении в том же месте, рекомендуем тщательную очистку при помощи спиртового раствора.

Если вкладка индикатора все еще выступает после поворота рычагов и нажатия на вкладку, необходимо переустановить поручень.

ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ КАК СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПОРУЧЕНЬ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.